



床ずれってなに？


寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。また、そこにずれ力加わるとより発生しやすくなります。

圧迫

① 細胞は血から栄養をもらっています。



② 血の流れが悪いと栄養がもらえません。

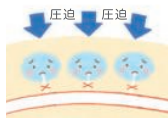


③ とうとう細胞が死んでしまいました。




床ずれ

ずれ力

①

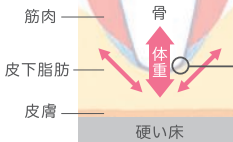


ハサミと同じ力
ハサミで紙を切る時と同じ
ような力がかかります。

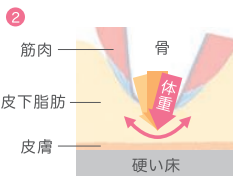

床ずれ

発生しやすい部位

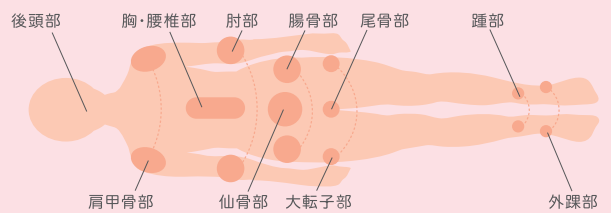

まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

Q1 ベッドの上で自分で寝返りできますか？	A1	・できる ・どちらでもない ・できない	0点 1.5点 3点	<input type="checkbox"/>	点
Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？ 	A2	・正常 ・軽度・中等度 ・高度	0点 1.5点 3点	<input type="checkbox"/>	点
Q3 むくみはありますか？	A3	・いいえ ・はい	0点 3点	<input type="checkbox"/>	点
Q4 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？	A4	・いいえ ・はい	0点 1点	<input type="checkbox"/>	点

合計点数は
何点でしたか？

1点でもついた人は、
床ずれになりやすい
人です。また、点数が
高い人ほど床ずれに
なりやすい人です。

合計 点

OHスケールとリスクレベル

合計点数	リスク	床ずれ発症率(目安)	治癒期間(目安)
0点	リスクなし・予防	—	—
1～3点	軽度リスク	約25%以下	40日
4～6点	中等度リスク	約26～65%	57日
7～10点	高度リスク	約66%以上	173日

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

合計点数	介護力あり	介護力なし	静止型	ハイブリッド型	圧切替型
0点	布団、ベッドマットレス	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散性能と、安楽性や安定性のバランスに優れています。		
1~3点		体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど		ウレタンフォームとエアを組み合わせたマットレスです。	
4~6点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上)			エアを自動的に出し入れし、圧がかかる場所を移動させるマットレスです。
7~10点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など	コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など			


<リスク>

- 予防～軽度
- 軽度～中度
- 中度～リスク保有者
- 軽度～リスク保有者

<種類>

- 圧切替型
- 静止型
- ハイブリッド

床ずれ対応マットレス一覧表

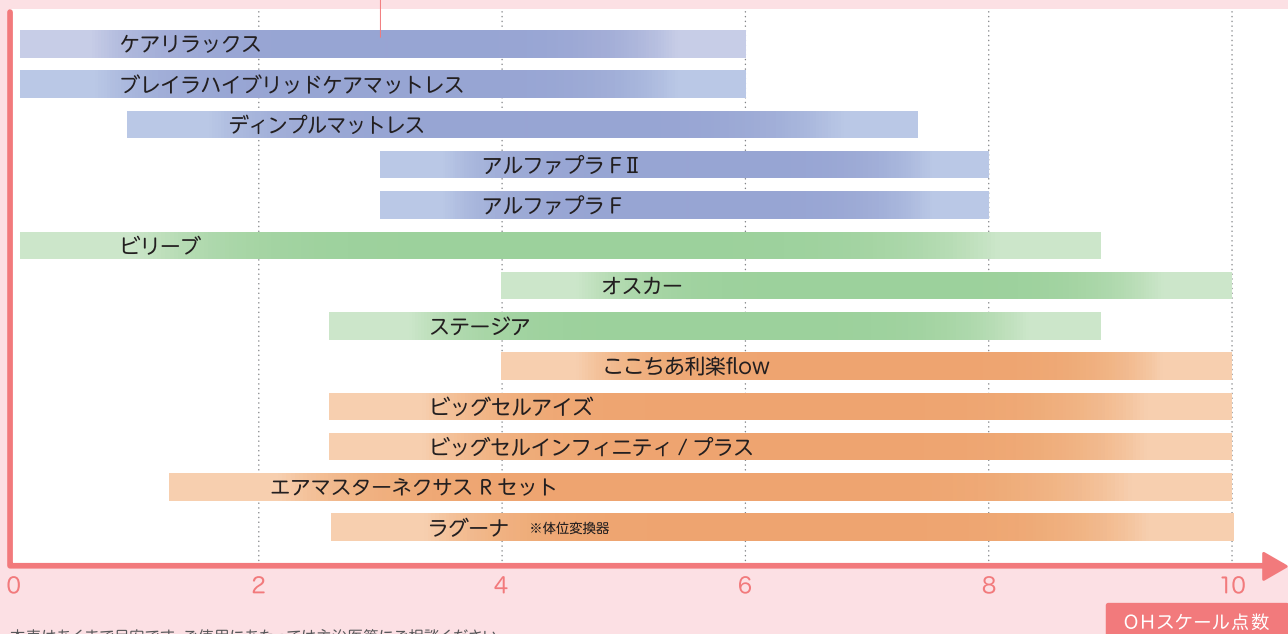

本表はあくまで目安です。ご使用にあたっては主治医等にご相談ください。

よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

観察ポイント例	必要なケア
動作 背上げの頻度 床上移動の仕方 起き上がりの仕方 移乗の仕方 かかとのずれ力	○質の高い動作介助 ○用具の利用
身体状況・体位 こうしやく 関節拘縮のレベル えんばい 円背のレベル 麻痺の箇所 側臥位の頻度 好意体位の有無	○質の高い動作介助 ○ポジショニング

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行
器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報


ケアリラックス

日本ケアサプライ

グリーン
ケア

予防～軽度

静止型

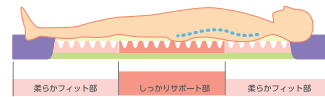

ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを軽減させる新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックスして行えます。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5400-1	00614-000003

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7.6kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5404-1	00614-000003

サイズ：幅 91 × 全長 181 × 厚さ 10cm 重さ：7.3kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5399-1	00614-000003

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7kg

材質/外カバー：ポリウレタンラミネート加工布(抗菌・防水) 内カバー：ポリエステルサテス、マット：ポリウレタンフォーム

ご利用者 負担額	(1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円	円	円	円

厚さ
10
cm

重さ
7~7.6
kg




ブレイラハイブリッド・ケアマットレス

グローバル産業

柔らかいのに動きやすい、通気と防水の両面仕様、床ずれ防止マットレス

予防～軽度

静止型

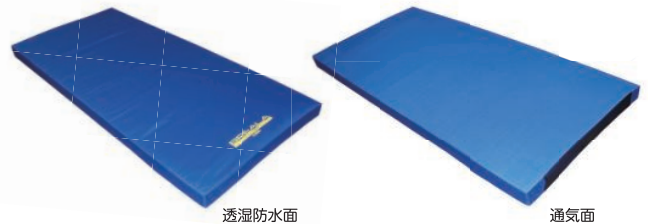

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5396-1	01149-000015

サイズ：幅91×全長195×厚さ8cm 重さ：13.5kg

ご利用者 負担額	(1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5397-1	01149-000016

サイズ：幅83×全長195×厚さ8cm 重さ：12kg

ご利用者 負担額	(1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円	円	円	円

厚さ
8
cm

重さ
12~13.5
kg



被験者/身長約160cm、体重約53kg、BMI値約20.7
測定器/タカノ株式会社製FSA圧力分布測定装置


材質/中材：天然ラテックス
カバー：(防水面) ナイロン100%、(通気面) ポリエステル100%

ディンプルマットレス

ケープ

軽度～中度

静止型

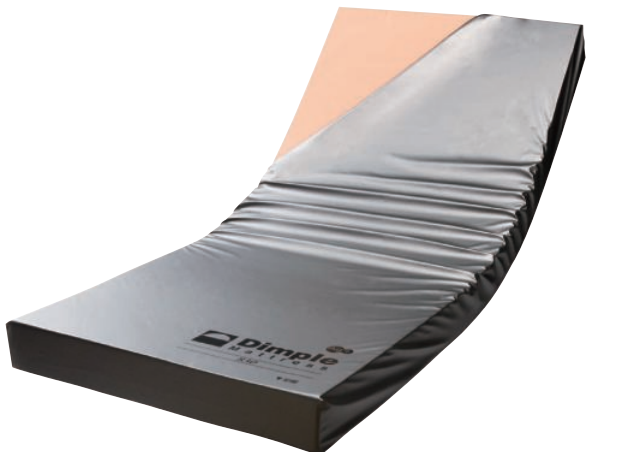

圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、各部位に最適な体圧分散を実現します。沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5422-1	00206-000070

サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm 重さ：6.6kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5435-1	00206-000070

サイズ：幅83×全長191×厚さ12cm 重さ：6kg

材質/カバー：(上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス
マット：(1、2層目面) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム

ご利用者 負担額	(1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円	円	円	円

厚さ
12
cm

重さ
6~6.6
kg



被験者/身長約155cm、体重約50kg、BMI値約20.8
測定器/ABW社製 ERGO CLASSIC

アルファプラ FII 撥水・防水


タイカ

軽度~中度 静止型



アルファプラ FII

床ずれ防止と快適な睡眠。
そして、できる限り自分の力でがんばりたい。
『寝返りサポートマットレス』

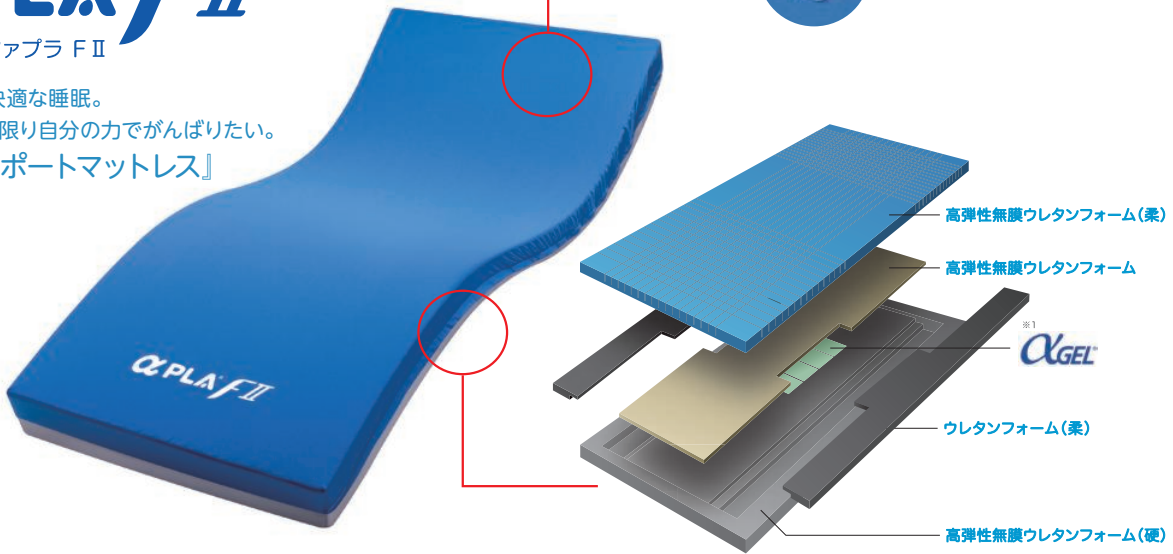

撥水カバー
専用カバーは撥水性が高く、失禁などにより汚染を防ぎます。

低体重の方から高体重の方まで

独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。

低体重(男性 BMI:18.5)



体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られる。

標準体重(男性 BMI:22.2)



厚さ 13 cm 重さ 7.8~9.0 kg

材質/マット: ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル
カバー: (表地) ポリエステル、(裏地) ポリウレタン

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5737-1	00563-000129
サイズ: 幅91×全長195×厚さ13cm 重さ: 9.0kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
円 (3割)	円	円
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	13-5739-1	00563-000130
サイズ: 幅91×全長181×厚さ13cm 重さ: 8.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
円 (3割)	円	円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5736-1	00563-000126
サイズ: 幅83×全長195×厚さ13cm 重さ: 8.3kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
円 (3割)	円	円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5738-1	00563-000127
サイズ: 幅83×全長181×厚さ13cm 重さ: 7.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
円 (3割)	円	円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具

アルファプラF 撥水・防水

タイカ

軽度~中度 静止型

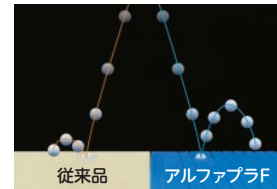

独自のスリット加工によりマットレスが身体にフィット。
体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。
変形してもすばやく戻る高弾性。適度な弾力が少ない力での寝返りや起き
上がりをサポートします。

厚さ 13 cm 重さ 9.5 kg

材質/マット: シリコーンゲル、ポリウレタンフォーム、
カバー: 表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5455-1	00563-000059
サイズ: 幅91×全長195×厚さ13cm 重さ: 9.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
円 (3割)	円	円

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています。
※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

ビリーブ

軽度～
リスク保有者 ハイブリッド

モルテン

寝返りの頻度を感じし、最適な圧対策に導く
自動フィッティングマットレス。



材質/エアセル：ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・安定支持
フォーム・床着き防止フォーム・高耐久ウレタンフォーム、インナー保護
フィルム：ウレタンフィルム、マットカバー：ウレタン合皮（制菌加工）

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5803-1	00054-000567
サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm 重さ：8.5kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5804-1	00054-000569
サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm 重さ：8.0kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5805-1	00054-000566
サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm 重さ：8.0kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5806-1	00054-000568
サイズ：幅83×全長182×厚さ13cm 重さ：7.5kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

オスカー

軽度～
リスク保有者 ハイブリッド

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き



●自動体位変換機能



厚さ
17
cm 重さ
11.5~13.5
kg

材質/マット：ウレタンフィルム（フィッティング層・底着き
防止層=高耐久ウレタンフォーム）、カバー：ウレタン合皮
消費電力：58W、1日約1.5~5.5円

●オスカーが備えている8つの特性

体圧分散性能 除圧性能 ずれ力対策 寝心地 座位安定性 むれ対策 ひえ対策 体位変換

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全：心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できるCPRボタン/CPRユニット)
(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5466-1	00054-000137
サイズ：幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ：13.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5468-1	00054-000137
サイズ：幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ：13kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5465-1	00054-000137
サイズ：幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ：12kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5467-1	00054-000137
サイズ：幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ：11.5kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

ステージア

軽度～
リスク保有者 ハイブリッド

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策



厚さ
13
cm 重さ
9.5~11
kg

材質/マット：(マイクロエアセル) ウレタンフィルム (フィッティング層
・底着き防止層) 高耐久ウレタンフォーム、カバー：伸縮性ウレタン合皮
消費電力：54W、1日約5.3円

●ステージアが備えている7つの特性

体圧分散性能 除圧性能 ずれ力対策 寝心地 座位安定性 むれ対策 ひえ対策

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全：心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)
(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5410-1	00054-000115
サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm マット重さ：11kg		
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5412-1	00054-000115
サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm マット重さ：10.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5409-1	00054-000115
サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm マット重さ：10kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5411-1	00054-000115
サイズ：幅83×全長182×厚さ13cm マット重さ：9.5kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

販売品

情報

こちあ利楽 flow (清拭)

パラマウントベッド

体重設定から体位変換、姿勢保持を全自動で行う
床ずれ防止エアマットレス

リモコン



材質/エアセル: ポリウレタン100% トップカバー: ポリエステル70%、ポリウレタン30% (抗菌・難燃・防水・透湿) グライドシート生地: ポリエステル100% グライドシートウレタン: ポリウレタン100% (難燃) ボトムカバー: ポリエステル90%、ポリウレタン10% (抗菌・難燃・防水) ポンプカバー: ポリエステル90%、ポリウレタン10% (抗菌・難燃・防水) チューブ: 塩化ビニル100% (抗菌・難燃) カプリング: PC/PBT 樹脂 (難燃) 消費電力:20W

厚さ 17 cm
重さ 12.2~12.9 kg

中～
リスク保有者 圧切替型 非課税

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5762-0	00170-001351
サイズ: 幅91×全長192.8×厚さ17cm マット重さ: 12.9kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ミニ	13-5764-0	00170-001352
サイズ: 幅91×全長184.5×厚さ17cm マット重さ: 12.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5766-0	00170-001353
サイズ: 幅83×全長192.8×厚さ17cm マット重さ: 12.4kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ミニ	13-5767-0	00170-001354
サイズ: 幅83×全長184.5×厚さ17cm マット重さ: 12.2kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

ケープ

優れた体圧分散性能に加え、床ずれ発生の
新たな外的要因である Microclimate
「皮膚局所の温度・湿度」にも対応する
次世代のエアマットレス。



材質/エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)、カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿・伸縮)、ベースシート: (側面・下面) ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ (すべり止め部) ポリウレタンフィルムラミネート加工布 ヘッドアップセンサ: ABS 樹脂 (ケース部) 換気ユニット: ABS 樹脂 (ケース部) 消費電力:8W

厚さ 15 cm
重さ 6.3~6.8 kg

中～
リスク保有者 圧切替型

商品名	商品番号	商品コード
900タイプ CR-753	13-5754-1	00206-000141
サイズ: 幅90×全長192×厚さ15cm マット重さ: 6.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
900ショートタイプ CR-757	13-5756-1	00206-000143
サイズ: 幅90×全長180×厚さ15cm マット重さ: 6.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
840タイプ CR-750	13-5753-1	00206-000140
サイズ: 幅84×全長192×厚さ15cm マット重さ: 6.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
840ショートタイプ CR-755	13-5755-1	00206-000142
サイズ: 幅84×全長180×厚さ15cm マット重さ: 6.3kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

ビッグセル インフィニティ/インフィニティプラス

ケープ



厚さ 17 cm
重さ 8.6~9.6 kg

中～
リスク保有者 圧切替型

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5445-1	00206-000074
サイズ: 幅90×全長191×厚さ17cm マット重さ: 8.6kg 消費電力: 12W、1日約6.9円		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
プラス90cm幅 レギュラー	13-5471-1	00206-000076
サイズ: 幅90×全長191×厚さ17 (足元のみ18) cm マット重さ: 9.6kg		
材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)		
消費電力: 40W、1日約27.4円 (専用パッド部含)		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

エアマスターネクサス Rセット

ケープ



厚さ 12 cm
重さ 8.1~9.1 kg

軽度～
リスク保有者 圧切替型

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5516-1	00206-000083
90cm幅 ショート	13-5518-1	00206-000085
サイズ: 幅90×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ: 9.1kg (ショート8.5kg)		
商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 レギュラー	13-5517-1	00206-000082
84cm幅 ショート	13-5520-1	00206-000084
サイズ: 幅84×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ: 8.6kg (ショート8.1kg)		
材質/エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)、カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿)		
消費電力: 10w、1日約4.8円		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。